

Игольчатый лечебно-профилактический массажер - Аппликатор Кузнецова



SKU: 11024

Stock Qty: 0



Product Description

KUZNETSOVI NÕELJAD APLIKAATORID N152.

Ümmargusel plastmassalusel asetsevad 6 mm vahedega plastmassist nõeljad vormid, kleebitud tekstiilmaterjalile. SOOVITATAV: individuaalseks kasutamiseks lihaste, liigeste ja selgroo ülepingete korral, abivahendina südame-veresoonkonna, hingamis- ja närvisüsteemi, seedetrakti jt. tegevuse normaliseerimiseks, töövõime tõstmiseks ja taastamiseks. KASUTAMINE: aplikaator asetatakse probleemsele kohale, vajutatakse 40-60 sek., korratakse kuni valu-aistingu kadumiseni. Protseduuride läbiviimise aeg ja arv ei ole piiratud. Peale kasutamist pesta harja ja seebiveega, loputada jooksva vee all. EI SOOVITATA kasvajate, mädaste haavade, tromboflebiidi jt. seisundite puhul, kus massaaž ei ole näidustatud. Säilitada toatemp. Säilimisaeg piiramatu. Hoida lastele kättesaamatus kohas! TOOTJA: ООО "Rezhevskoye predpriyatie Eltiz", Rezh, Venemaa.

Product Specification

Lisainfo

Peamine toime

Massaaž

Tootmisriik

Venemaa