

Аппликатор Кузнецова в индивидуальной упаковке (основа-плёнка) 260*560 мм (144 модуля)



SKU: V00000007021

Stock Qty: 0



Product Description

KUZNETSOVI NÕELAD APLIKAATOR N144 260 x 560mm Ümmargusel plastmassalusel on 6 mm vahedega plastmassist nõeljad vormid, kleebitud tekstiilmaterjalile. SOOVITATAV: individuaalseks kasutamiseks lihaste, liigeste ja selgroo ülepingete korral, abivahendina südame-veresoonkonna, hingamis- ja närvisüsteemiprobleemide korral, seedetrakti jt. tegevuse normaliseerimiseks, töövõime tõstmiseks ja taastamiseks. KASUTAMINE: aplikaator asetatakse probleemsele kohale, vajutatakse 40-60 sek., korraldatakse kuni valu kadumiseni. Protseduuri läbiviimise aeg ja arv ei ole piiratud. Peale kasutamist peske aplikaator harjaga seebivees, loputage jooksva vee all. VASTUNÄIDUSTUSED: kasvajate, mädaste haavade, tromboflebiidi jt.seisundite puhul, kus massaaž ei ole näidustatud. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida toatemperatuuril kuivas kohas, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Säilimisaeg on piiramatu. TOOTJA: OOO "Rezhevskoye predpriyatie Eltitz", Rezh, Venemaa. MAALETOOJA: VITATEKA OÜ, Mõisa tee 5, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa, Eesti 74204 www.vitateka.ee KUZNETSOVI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ N144 260 x 560mm Σε μια στρογγυλή πλαστική βάση, υπάρχουν πλαστικά καλούπια βελόνας σε απόσταση 6 mm επικολλημένα στο ύφασμα. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ: για ατομική χρήση σε περίπτωση υπερέντασης μυών, αρθρώσεων και σπονδυλικής στήλης, ως βοήθημα για το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το νευρικό σύστημα, το γαστρεντερικό κ.λπ. για την ομαλοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της απόδοσης και την αποκατάσταση της απόδοσης. ΧΡΗΣΗ: Το απλικατέρ τοποθετείται στο σημείο του προβλήματος, πιέζεται για 40-60 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαφανιστεί ο πόνος. Ο χρόνος και ο αριθμός των διαδικασιών δεν είναι περιορισμένοι. Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε με ένα πινέλο σε σαπουνόνερο, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: για όγκους, πυώδεις πληγές, θρομβοφλεβίτιδα κ.λπ., όπου δεν ενδείκνυται μασάζ. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά! Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από το φως και την υγρασία. Η διάρκεια ζωής είναι απεριόριστη. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: OOO "Rezhevskoye predpriyatie Eltitz", Rezh, Ρωσία. ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Εξαγωγέας Κακφικας Νικητας

Product Specification

Lisainfo

Основное действие

Для массажа