

Аппликатор Кузнецова в индивидуальной упаковке (основа-плёнка) 260*560 мм (144 модуля)



SKU: V00000007021

Stock Qty: 0



Product Description

KUZNETSOVI NÖELAD APLIKAATOR N144 260 x 560mm Ümmargusel plastmassalusele on 6 mm vahedega plastmassist nõeljad vormid, kleebitud tekstiilmaterjalile. SOOVITATAV: individuaalseks kasutamiseks lihaste, liigeste ja selgroo ülepingete korral, abivahendina südame-veresoonkonna, hingamis- ja närvvisüsteemiprobleemide korral, seedetrakti jt. tegevuse normaliseerimiseks, töövõime tõstmiseks ja taastamiseks. KASUTAMINE: applikaator asetatakse probleemsele kohale, vajutatakse 40-60 sek., korratakse kuni valu kadumiseni. Protseduuride läbiviimise aeg ja arv ei ole piiratud. Peale kasutamist peske applikaator harjaga seebivees, loputage jooksva vee all. VASTUNÄIDUSTUSED: kasvajate, mädaste haavade, tromboflebiidi jt. seisundite puhul, kus massaaž ei ole nädustatud. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida toatemperatuuril kuivas kohas, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Säilimisaeg on piiramatu. TOOTJA: OOO "Rezhevskoye predpriyatiye Eltiz", Rezh, Venemaa. MAALETOOJA: VITATEKA OÜ, Möisa tee 5, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa, Eesti 74204 www.vitateka.ee KUZNETSOVI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ N144 260 x 560mm Σε μια στρογγυλή πλαστική βάση, υπάρχουν πλαστικά καλούπια βελόνας σε απόσταση 6 mm επικολλημένα στο ύφασμα. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ: για ατομική χρήση σε περίπτωση υπερέντασης μυών, αρθρώσεων και σπονδυλικής στήλης, ως βοήθημα για το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το νευρικό σύστημα, το γαστρεντερικό κ.λπ. για την ομαλοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της απόδοσης και την αποκατάσταση της απόδοσης. ΧΡΗΣΗ: Το απλικατέρ τοποθετείται στο σημείο του προβλήματος, πέζεται για 40-60 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαφανιστεί ο πόνος. Ο χρόνος και ο αριθμός των διαδικασιών δεν είναι περιορισμένοι. Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε με ένα πινέλο σε σαπουνόνερο, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: για όγκους, πυωδεις πληγές, θρομβοφλεβίτιδα κ.λπ., όπου δεν ενδείκνυται μασάζ. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά! Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από το φως και την υγρασία. Η διάρκεια ζωής είναι απεριόριστη. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: OOO "Rezhevskoye predpriyatiye Eltiz", Rezh, Pwosia. ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Εξαγωγεας Κακφικας Νικητας

Product Specification

Lisainfo

Peamine toime	Massaaž
Tootmisriik	Venemaa