

Озокерит для теплолечения, 1кг - Medical Fort

SKU: V00000014329

Stock Qty: 0



Product Description

Medical Fort Osokeriit 1 kg

Kirjeldus: Osokeriiditeraapia on efektiivne lülisamba degeneratsiooni, radikuliidi, luumurdude ja vigastuste, lihaspõletike, ishiase ja luuvalu raviks. Samuti sobib see närvisüsteemi haiguste raviks. Tootes sisalduv osokeriit pakub soojust, mis aitab leevendada erinevaid vaevusi.

Koostis (INCI): osokeriit

Kasutamine:

1. Kuumutage osokeriit segu kuni täieliku lahustumiseni.
2. Valage segu vormi ja laske sellel taheneda temperatuuril 45-50°C.
3. Kandke külmunud toode kehapiirkonnale ja katke tekiga.
4. Protseduuri kestus on 20-60 minutit.
5. Pärast protseduuri puhake 30-40 minutit.
6. Soovitav kuur on 10-12 protseduuri.

Hoiatused:

- Mitte kasutada raseduse ja imetamise ajal.
- Vältige kasutamist, kui olete ülitundlik mõne koostisosa suhtes.
- Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole.
- Ainult välispidiseks kasutamiseks. Vältige silma sattumist. Silma sattumisel loputage põhjalikult veega.
- Säilitada temperatuuril +5°C - +25°C, kuivas, pimedas kohas, lastele kättesaamatus kohas.
- Vanusepiirang: alla 2-aastastele lastele ei tohi kasutada.

Parim enne: vt. pakendilt

Tootja: MedicalFort, Belarus

Maaletooja: VITATEKA OÜ, Mõisa tee 5, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa, Eesti

Product Specification

Lisainfo

Nähatüüp	Sobib kõikidele nahatüüpidele
Peamine toime	Soojendavad
Tootmisriik	Valgevene
Certification and Diet	Meditšiiniseadmed
Pikkus	0.000000
Kõrgus	0.000000
Laius	0.000000