

"VITATEKA\" Fito nanoplaster forte 5 tk



SKU: V00000014684

Stock Qty:



Product Description

Kirjeldus: toode, mis on loodud ja välja töötatud, et maksimaalselt kasutada selliste koostisosade kasulikke omadusi nagu kuradiküüs, arnika ja paju, naha hooldamiseks liigestepiirkonnas. Toode kaitseb eriti tõhusalt lihaste ja liigeste valu käes kannatavaid piirkondi ning erinevate kontraktuuride, näiteks reumaatilise valu, spordivigastuste, kaela- ja seljavalu puhul. Plaastrite spetsiaalne tehnoloogia tagab 24-tunnise toime. Ühekordne meditsiiniline toode.

Kasutusjuhend:

1. Avage pakend ja eemaldage plaaster.
2. Eemaldage läbipaistev kaitsekile.
3. Asetage plaaster kahjustatud piirkonnale, veendudes, et see sobib hästi nahale.
4. Jätke plaastrit 24 tunniks, seejärel vahetage see uue vastu.
5. Vajadusel võib plaastri väiksemaks lõigata kääride abil.

Hoiatused:

- Ainult välispidiseks kasutamiseks.
- Kasutage ainult puhtal, kuival ja terve nahal.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
- Ärge kasutage alla 16-aastastel lastel ega rasedatel või imetavatel naistel ilma arstiga konsulteerimata.
- Kui ilmnevad ärrituse või ülitundlikkuse tunnused, lõpetage kasutamine.
- Kahjustatud pakend võib toote tööd ja ohutust häirida.
- Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud.

Säilitamine: Hoidke kuivas, jahedas ja otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas. Hoida temperatuuril +5°C kuni +25°C.

Parim enne: Vaata pakendilt.

Product Specification

Lisainfo

Pikkus	0.000000
Kõrgus	0.000000
Laius	0.02