

# Массажер "Волшебная лента здоровье" 4,3 Ag (1+1, 9 сегментный) - Луарко



SKU: 100000006525

Stock Qty: 0



## Product Description

Набор, состоящий из двух эластичных лент: 1-я лента - длиной 4,86 м - с бинтрезинной и 3,96 м - без бинтрезинной, шириной 22 мм; 2-я лента - длиной 4,86 м - с бинтрезинной и 3,96 м - без бинтрезинной. Количество игл - 9180, расстояние между иглами - 4,3 мм. Каждая лента состоит из 9-ти сегментов. Сегмент - это часть ленты длиной, примерно, 44 см. Каждая лента состоит из рабочей части (с иглами) и бинтовой резины (без игл) - для мягкой фиксации ленты на теле.

**Аппликатор "Волшебная лента "Здоровье"** - очень эластичная и щадящая кожу лента с закрепленными «сота» игл. Обмотку лентой можно производить как под наблюдением врача, так и самостоятельно в домашних условиях. Увеличенная площадь покрытия оказывает уникальное оздоровительное действие на организм в процессе оздоровления практически всех акупунктурных точек обрабатываемой зоны. После обматывания аппликатором возникает ощущение легкости, тепла, расслабления, с полным восстановлением сил и энергии организма. Интенсивность прижима игл ленты к кожному покрову регулируется в процессе обмотки. Лента не стесняет движения и позволяет совершать активные действия, комплекс разминочных или восстановительных упражнений.

- Помогает в лечении и профилактике различных заболеваний;
- Купирует боли в позвоночнике, суставах и мышцах, головные боли;
- В спорте позволяет быстрее восстанавливаться после физических нагрузок;
- Обеспечивает ускоренное восстановление (после травм, растяжения мышц, переломов, хирургических операций) за счет значительного ускорения биохимических, окислительно-восстановительных процессов в организме;
- Повышает в 2-3 раза эффективность массажа, мануальной терапии;
- Повышает силовую и скоростную выносливость спортсменов;
- Увеличивает работоспособность организма.

Продолжительность аппликационного сеанса зависит от выбранного вида воздействия:

тонизирование - от 7 до 10 минут;

успокаивающий эффект, помощь при хронических заболеваниях - 20 минут;

снятие острой боли - от 10 до 30 минут;

повышение работоспособности, выносливости организма - от 8 до 12 минут;

восстановление после тренировок, игр - от 15 до 30 минут;

восстановление после травм, операций и т.д. Заматывания производить 2-3 раза в день на 2-10 минут - выше или ниже зоны повреждения. (Если имеется доступ и сохранена целостность кожи, обрабатывается и сама зона повреждения. При травмах рук и ног обязательно обматывать на здоровой конечности зону, симметричную месту повреждения. Желательно одновременно или последовательно воздействовать на зоны позвоночника в области соответствующей иннервации корешков спинномозговых нервов.)

Для включения сверхвозможностей, дополнительных адаптационных механизмов, сеанс может быть продлен до 40-60 минут с дополнительным принудительным ограничением дыхания с помощью волевого усилия или дыхательной пирамиды. После завершения аппликаций желателен кратковременный массаж или втирание масел на основе лечебных трав и других полезных натуральных компонентов.

## Product Specification

Lisainfo

**Peamine toime**

Usaldusväärne liigeste tugi

**Tootmisriik**

Ukraina