

Kuznetsovi nõelad aplikaator №152



SKU: V100000002277

Stock Qty:



Product Description

KUZNETSOVI NÕELJAD APLIKAATORID N152.

Ümmargusel plastmassalusel asetsevad 6 mm vahedega plastmassist nõeljad vormid, kleebitud tekstiilmaterjalile. SOOVITATAV: individuaalseks kasutamiseks lihaste, liigeste ja selgroo ülepingete korral, abivahendina südame-veresoonkonna, hingamis- ja närvisüsteemi, seedetrakti jt. tegevuse normaliseerimiseks, töövõime tõstmiseks ja taastamiseks. KASUTAMINE: aplikaator asetatakse probleemsele kohale, vajutatakse 40-60 sek., korratakse kuni valu-aistingu kadumiseni. Protseduuride läbiviimise aeg ja arv ei ole piiratud. Peale kasutamist pesta harja ja seebiveega, loputada jooksva vee all. EI SOOVITATA kasvajate, mädaste haavade, tromboflebiidi jt. seisundite puhul, kus massaaž ei ole näidustatud. Säilitada toatemp. Säilimisae piiramatult. Hoida lastele kättesaamatus kohas! TOOTJA: ООО "Резhevское предприятие Елтис", Резх, Венемая.

Product Specification

Lisainfo

Основное действие

Для массажа