

Magnet põlvefiksaator



SKU: V00000004116

Stock Qty:



Product Description

Toetada, stabiilsuse, ning mis kõige olulisem - mõju magnetid. Abi Tühista pingeid ja parandab vereringet. Sobib igas suuruses ja ei ole nähtav riided. Action: mõjul magnetvälja piirkonnast põlveliigese normaalses ringlusse, siis aktiveerib hapnikuvarustust kudedes, parandades võimsus ülejäänud osad kõhre, luu tugevnenud ühiseid löigud sissevoolust kaltsiumiioone seal vähendatakse turset ja põletikku, valu elimineeritakse. Töötlemisviis: magnetvälja nakoloennik vaja panna põlve ja määrata Velcro. Kanda saab lõputult pika aja jooksul, positiivse efekti. Kestus seljas põlvepolstrid sõltub konkreetsest tolerantsiga keha kasutades magnetvälja suhtes soovitud juua vähemalt 3-4 klaasi puhast vett päevas Soovitused hoolt bandaaž võib pesta (käte pesemine), kuivatati õhus Attention !!! ei kasutata südamestimulaatoriga inimesed või muude seadmete kehas; ei kasuta avatud haavad; vältida otsest kontakti objektid, mis on magnetvälja suhtes tundlikke (kellad, audio-video linnid, krediitkaardid, kaasaskantavate elektrooniliste seadmete, jne); ei soovitata rasedatel

Product Specification