

Пластырь для ран 2,3x7,2



SKU: 900831
Stock Qty: 0



Product Description

Isekleepuv äär kinnitub tihedalt haava ümber ja kaitseb välise saastumise eest. Isekleepuv steriilne absorbeeriv plaaster sobib kasutamiseks väheste ja mõõduka eritusega haavadele, nagu kirurgilised haavad, sisselõiked ja marrastused.

Kasutamisinstruktsioonid: Avada pakend. Võtta plaaster välja. Hoida kinni mõlemast vaheliti asetatud kaitsekilest, vabastada kleepuv pind ja alustada plaastri fikseerimist. Plaaster asetada nahale ilma venitamata ja õrnalt eemalda ülejäänud osa kaitsekilest. Kindlalt siluda kleepuv äär nahale. Ära venita plaastrit paigaldamisel. Plaastri vahetamise sagedus sõltub haava olukorrast. Eemaldamisel võtta kinni plaastri servadest ja eemaldada aeglaselt nahalt, vältides vastukarva tõmbamist.

Suurus 2,3x7,2 sm

Product Specification

Lisainfo

Tootmisriik	Läti
Pikkus	0.000000
Kõrgus	0.000000
Laius	0.000000