

Korsett kehahoia korrigeerimiseks "GRACE" 655-2



SKU: 655-2
Stock Qty:



Product Description

СОСТАВ: хлопок - 30%, полиэстер - 30%, пенополиуретан - 40%

Действие:

Индивидуальная коррекция осанки на протяжении дня.

Разведение пояса верхних конечностей и восстановление тонуса мышц.

Формирование правильной осанки у детей и взрослых, кифозы, кифосколиозы, крыловидные лопатки.

Период реабилитации после травм и операций грудного и верхне-поясничного отделов позвоночника, ключицы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье.

Рекомендуется носить в течении 3-4-х часов ежедневно, начиная с 15-25 минут ежедневно.

Применять по рекомендации врача. Не использовать после истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить при комнатной температуре, предохраняют воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Местные заболевания кожи, необходимость жесткой фиксации.

Product Specification

Lisainfo

Tootmisriik	Ukraina
Pikkus	0.000000
Kõrgus	0.000000
Laius	0.12