

# Kuznetsovi aplikaator kaela- ja alaseljale 40\*15\*17



**SKU:** 100000007951  
**Stock Qty:**



## Product Description

Aplikaatori Kuznetsova padi 44\*17 Massaažipadja aplikaatorit kasutatakse radikuliidi, osteokondroosi, radikulaarsete sündroomide, spondüloartroosi, müosiidi, lihaste hüpotroofia ja hüpotensiooni korral. Pealegi kasutatakse patja kõrge vererõhu, unetuse, migreeni ja sagedaste peavalude korral. Samuti kasutatakse rehabilitatsiooniks pärast operatsiooni ja vigastusi. Aplikaatoripadi on valmistatud spetsiaalsetest kombineeritud materjalidest. Aplikaatoripadi on mõeldud individuaalseks kasutamiseks, seadme tööpõhimõte seisneb selles, et kangapõhjale asetatud väikesed nõelad (kõrgus 5-8mm) toimivad kehapinna refleksialadel. KASUTAMINE: padja tuleb asetada tasasele, keskmiselt kõvale pinnale ja asetada selle kohale. Sessiooni on võimalik läbi viia diivanil või voodil, kui need on piisavalt kindlad. Protseduur on soovitatav läbi viia enne sööki või 1 tund pärast sööki. Enne massaaži tuleb põis tühjendada. Protseduuri ajal proovige perioodiliselt keha tõsta ja veidi nihutada, et muuta nõelaelementide kaldenurka naha punktide suhtes. Pärast protseduuri peate lamama lõdvestunud asendis 10-15min. VASTUNÄIDUTUSED: luumurrud ja traumad, verejooks, lümfisõlmede põletik, tuberkuloosi avatud vorm, AIDS ja HIV, tüükad või papilloomid nahal, hemofiilia, osteomüeliit, psühholoogilised häired. Aplikaatoripatja on soovitatav pesta käsitsi sooja vees (35 °C), kasutades selleks õrnu ja kvaliteetseid detergente. Soovitatav kuivatada lamedana, ilma kütteseadmeid kasutamata. Ainult välispidiseks kasutamiseks. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida toatemperatuuril kuivas kohas, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

## Product Specification

Lisainfo

|        |          |
|--------|----------|
| Pikkus | 0.000000 |
| Kõrgus | 0.000000 |
| Laius  | 0.19     |