

Аппликатор "Волшебная лента Здоровье" 4,3 Ag 7 сегментов (2,2 x 398 см) - Лярко



SKU: 100000006528

Stock Qty: 0



Product Description

Elastne lint pikkusega 3,98 m - sidemekummiga ja 3,08 m - ilma sidemekummita, laius 22 mm. Nõelte arv - 3570. Nõelte vaheline kaugus - 4,3 mm. Lint koosneb 7 segmendist (üks segment on umbes 44 cm pikk). Igal lindil on tööosa (nõeltega) ja sidemekumm (ilma nõelteta) pehme fikseerimise jaoks kehale.

Апликаатор "Воллунт Тервис" он вэга еластне жа нахасобралик лнт, мллеле он кнннтатуд нёлакобарад. Лндига мähкнмшт вёлб теа нн аршт жäreвалве алл куи ка исесеисвалт кодус. Суурендатуд катвуспнрконд штмулеернб пеааегу кёлкн акупунктуурнпункте ракendusалал. Пärast аплнкааторн касутамшт текнб кergus, соожус жа лөөгастустунне, самутн кеха тällелнк жөө жа енергнја таастумнне. Нёлте surve intensiivsust saab reguleerida mähkнмшт кällгус. Лнт ен пнра лнкумшт жа вёлмалдаб теа актнвсеид харжутусн, соожendusн вёл таастумштreenнгунд.

- Aitab ravida ja ennetada erinevaid haigusi;
- Leevendab valu selgroos, liigestes, lihastes ja peavalu;
- Aitab kiiremini taastuda pärast füüsilist koormust;
- Kiirendab regenereerimisprotsessi pärast vigastusi, lihasevenitusi, luumurde ja operatsioone, tugevdades organismi biokeemilisi protsesse;
- Suurendab massaaži ja manuaalteraapia efektiivsust 2-3 korda;
- Parandab sportlaste jõu- ja kiirusvastupidavust;
- Parandab organismi töövõimet.

Seansi kestus sõltub kasutamise eesmärgist:

- Tonus ja energia - 7-10 minutit;
- Lööгastav mõju, krooniliste haiguste toetamine - 20 minutit;
- Ägeda valu leevendamine - 10-30 minutit;
- Töövõime ja vastupidavuse parandamine - 8-12 minutit;
- Taastumine pärast treeninguid ja võistlusi - 15-30 minutit;
- Taastusravi pärast vigastusi ja operatsioone - 2-3 korda päevas 2-10 minutit kahjustatud piirkonna kohal või all. Kui nahk on terve, võib kanda otse kahjustatud kohale. Käte ja jalgade vigastuste korral on soovitatav lisaks mähkida ka terve jäsеме sümmeetriline ala. Kеха kohanemisvõime suurendamiseks võib seansi kestust pikendada kuni 40-60 minutini koos hingamisharjutustega. Pärast kasutamist on soovitatav teha kerge massaaž või kasutada ravimtaimedest valmistatud õlisid.

Product Specification

Lisainfo

Основное действие

Для суставов